



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El termómetro Medical Indicators Tempa-DOT desechable de uso clínico proporciona un método exacto, fiable y seguro para la monitorización clínica rutinaria de la temperatura corporal. Este instrumento desechable mide la temperatura corporal en grados Fahrenheit, abarcando el intervalo de 96.0°F a 104.8°F. Cada punto cambia de color beige a azul brillante, en incrementos de 0.2°F respecto al punto anterior. Este instrumento cumple el estándar E 825-98 de la ASTM. Rango limitado.

PRECAUCIONES

Cuando se expone a temperaturas superiores a 95°F, los puntos se vuelven azules. Si esto sucede, introduzca en el congelador una hora por unidad o 16 horas por caja. Déjelo a temperatura ambiente un día. Puede que los puntos tengan un color levemente diferente del normal; esto no afecta a la precisión de los termómetros.

NO REUTILIZAR

La reutilización puede comprometer la integridad del producto o provocar un fallo en el dispositivo. Además, puede ocasionar un riesgo de contaminación de la herida o infección cruzada en los pacientes, lo que puede causarles lesiones o enfermedades o, incluso, la muerte.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Sin látex



Estéril siempre que el envase no esté abierto o deteriorado


© 2017, Medical Indicators. Todos los derechos reservados.
Tempa•DOT son marcas comerciales de Medical Indicators.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE LA TEMPERATURA ORAL


1. Coloque el instrumento lo más atrás posible debajo de la lengua, orientando los puntos hacia arriba o hacia abajo (diagrama A).
2. Pídale al paciente que sujete el termómetro presionándolo firmemente hacia abajo con la lengua, y que mantenga la boca cerrada durante 60 segundos. Una vez introducido el termómetro, los labios de una persona adulta deberían tocar el centro del logotipo Tempa-DOT™.
3. Retire el termómetro. Espere aproximadamente 10 segundos. Puede que algunos puntos azules desaparezcan mientras el termómetro se ajusta para proporcionar un valor exacto.
4. Lea el último punto azul, pasando por alto cualquier punto que haya saltado (diagrama B).
5. Anote la temperatura y deseche el termómetro.

Para evitar lecturas incorrectas, asegúrese de:

- Colocar correctamente el termómetro en la boca. Pedir al paciente que mantenga la boca cerrada durante 60 segundos antes de retirar el termómetro.
- Leer el último punto azul después del ajuste final del termómetro. Ignorar todos los puntos que se hayan saltado.
- Vuelva a medir la temperatura con un termómetro nuevo si se ha dejado en contacto con la piel más de 2 minutos.
- Espere al menos 15 minutos antes de medir la temperatura si el paciente ha estado expuesto a clima frío, o si ha estado fumando, comiendo o bebiendo.

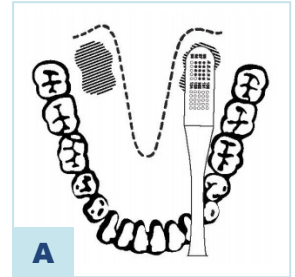


A

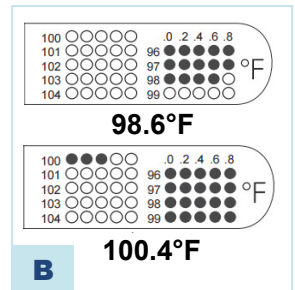

B

INSTRUCCIONES PARA TOMA DE LA TEMPERATURA AXILAR

Coloque el termómetro bien arriba en la axila, en posición vertical respecto al cuerpo, de modo que los puntos estén en contacto con el torso. Baje el brazo al paciente para que sujete el termómetro (diagrama C). Retire el termómetro después de 3 minutos. Lea el último punto azul después del ajuste final del termómetro. Vuelva a medir la temperatura con un termómetro nuevo si se ha dejado en contacto con la piel más de 5 minutos.

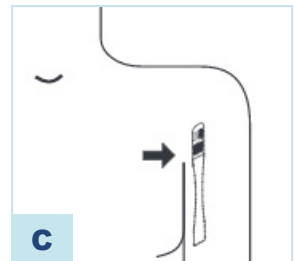

C

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO

No exponga el termómetro a temperaturas superiores a los 95°F; almacénelo en un lugar fresco a menos de 86°F. Los termómetros Tempa-DOT tienen una caducidad de dos años. No emplee el termómetro después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Si el envase está dañado o abierto, el producto ya no es estéril.

Desviación de la medición de la temperatura según la ASTM (diferencia designada en las temperaturas predictivas del termómetro y las temperaturas de prueba en baño de agua): 0.4°F - 0.8°F